



1


VANDLÅS



- Fyld sprøjten med 45 ml sterilt vand.
- Fyld vandlåsen gennem porten (1) som anvist på figuren. Når sprøjten fjernes, lukker porten (1) automatisk.

2

INDSTILLING AF VAKUUM

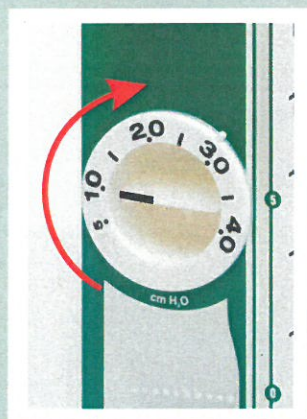

- Drej den graduerede knop til det ønskede vakuumniveau. En hvilken som helst værdi fra -5 cmH₂O til -40 cmH₂O.

3



- Forbind drænslangen til porten (2).
- Forbind drænslangen med patientens dræn.
- Sørg for, at slangen er sikkert forbundet.

4

PATIENT OG SUG



- Slut sugekilden til porten (3).

- En hvilken som helst position for den røde flyderindikator, når bare den er synlig, viser, at systemet fungerer korrekt. Når den røde flyderindikator er i position (4), kører systemet i det optimale forhold mellem ydelse/lufforbrud.

