


LUCASTM 2 Lynvejledning

Brystkompressionssystem

BEMÆRK: Denne vejledning er ikke en fuldstændig brugervejledning. Se i "brugervejledningen" for at få oplysninger om fuldstændige brugsanvisninger, indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og potentielle negative indvirkninger.

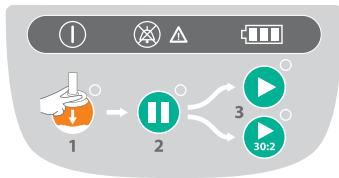

TÆND/SLUK



JUSTER



PAUSE



AKTIV
(kontinuerlig)




AKTIV
(30:2)

Verificer, at der er tale om hjertestop, og påbegynd manuel hjertemassage med minimale afbrydelser, indtil LUCAS er påsat og klar til brug.




1 Aktiver (A)

- Tryk på **TÆND/SLUK** i 1 sekund for at starte selvtesten og tænde LUCAS

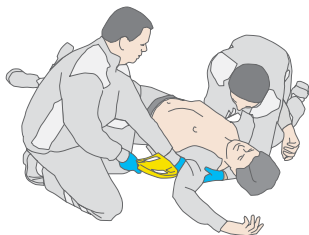


2 Bagplade (B)

- Afbryd manuel hjertemassage midlertidigt
- Anbring forsigtigt bagpladen under patienten, så den ligger under armhulerne
- Genoptag manuel hjertemassage

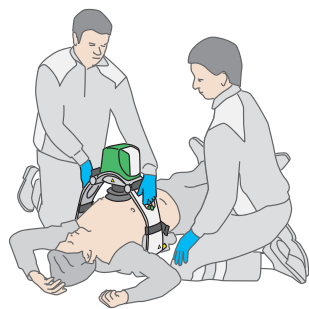

3 Kompressor (C)

- Træk i frigørelsesringene én gang; klolukningerne åbnes. Slip derefter frigørelsesringene
- Fastgør på bagpladen; lyt efter "klik"
- Træk opad én gang for at sikre fastgøring

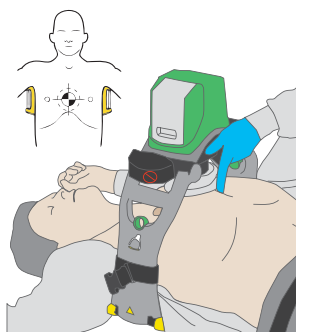

4 Placer sugekoppen

- Centrer sugekoppen over brystet
- Sugokoppens nederste rand skal placeres umiddelbart over den nederste del af sternum


5 Tryk sugekoppen nedad

- Tryk sugekoppen nedad med to fingre (sørg for, at enheden er i tilstanden **JUSTER**)
- Trykpudden indvendigt i sugekoppen skal berøre patientens bryst. Hvis pudden ikke rører patienten eller ikke passer ordentligt, skal der fortsættes med manuelle kompressioner
- Tryk på **PAUSE** for at låse startpositionen – fjern derefter fingrene fra sugekoppen




6 Påbegynd kompressionerne

- Kontrollér, at positionen er korrekt. Juster om nødvendigt
- Tryk på **AKTIV (kontinuerlig)** eller **AKTIV (30:2)**
- LUCAS foretager kompressioner med en hastighed på 100 i minuttet og med 4-5 cm dybde

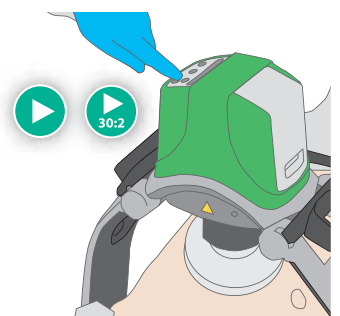

7 LUCAS stabiliseringsstrop

- Fastgør LUCAS stabiliseringsstroppen

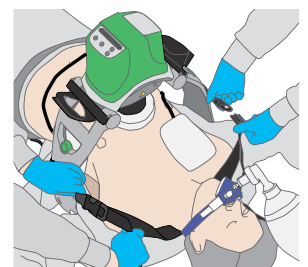

Følg altid lokale og/eller internationale retningslinjer for hjertemassage, når du bruger LUCAS.