



April 2018

Daglig test af defibrillator



- Afbryd strømmen – hiv stikket ud af kontakten
- Sæt kabelstikket i den sorte testport (sidder på samme kabel)
- Indstil funktionsvælgeren på "Defib" **(1)**
- Vælg energi 30 joule – ved at trykke på pilen ved energi-valg
- Tryk på "oplad" **(2)**
- Tryk på "shock" **(3)** og apparatet skal vise "Test OK" på skærmen.
Der udskrives automatisk en strimmel. Stop denne ved at trykke på "Print".
- Stil funktionsvælgeren tilbage på "Off"
- Sæt kabelstikket tilbage på Pads igen
- Tilslut strømmen igen – sæt stikket i kontakten.
Tjek, at lampen konstant lyser gul eller grøn. (Gul=oplader; Grøn=er ladet op).
Hvis lampen blinker kontaktes Teknisk Afdeling
- Tjek om der er papir nok i apparatet
- Dokumenter med dato og initialer i registreringskemaet.

OBS Kabelstikket skal – ud over ved test – ALTID være tilsluttet Pads, så defibrillatoren er klar til brug