

## **Rengøring af sug på iltbrættet: BPS/N26**

Når suget har været i brug, gøres følgende:

### **På det afsnit det har været anvendt:**

- Fra det sorte gummilåg afmonteres studsens med slange, der går hen til doseringsenheden.
- I modsat side af det sorte gummilåg, afmonteres gummislangen fra den lille, gennemsigtige, hårde plastikstuds, som bliver siddende i gummilåget.
- Slangen, der har været i berøring med pt., kasseres herefter.
- Sugebeholder og sort gummilåg skilles ad og skylles grundigt i varmt vand.
- Løsdelene medgives afsnit 16's personale inden de går retur til afsnit 16.

### **På afsnit 16:**

- Start med at påmontere den rene beholder, gummilåg og studse, som findes i afsnittet som ekstra udstyr, så iltbrættet fungerer igen.
- Den brugte, skyllede beholder, gummilåg samt den lille hårde gennemsigtige plastikstuds, anbringes alene i afsnittets opvaskemaskine og vaskes ved højeste temperatur
- Når udstyret er tørt, lægges det på plads og opbevares som rent ekstraudstyr til næste gang suget har været i brug.

### **N26/Frederikshavn:**

- Fra det sorte gummilåg afmonteres studsens med slange, der går hen til doseringsenheden.
- I modsat side af det sorte gummilåg, afmonteres gummislangen fra den lille, gennemsigtige, hårde plastikstuds, som bliver siddende i gummilåget.
- Slangen, der har været i berøring med pt., kasseres herefter.
- Sugebeholder og sort gummilåg skilles ad og skylles grundigt i varmt vand.
- Den brugte, skyllede beholder, gummilåg samt den lille hårde gennemsigtige plastikstuds, anbringes alene i afsnittets opvaskemaskine og vaskes ved højeste temperatur

Version 1  
20. februar 2013

- Når udstyret er tørt, påmonteres den rene beholder, gummilåg, slanger og studse, så iltbrættet fungerer igen.

Fra Teknisk Afdeling kan der rekvireres ekstra slanger, studse samt ilt.