

Vejledning til brugen af: *safePICO* Arterie sprøjter.


selfFill



safePICO sprøjter kan håndteres med én hånd.

Indstil stemplet til det ønskede volumen ved at holde fast i sprøjstens fingergreb og trække stemplet tilbage, min. 1 ml.


Figur 1 Indstil stemplet

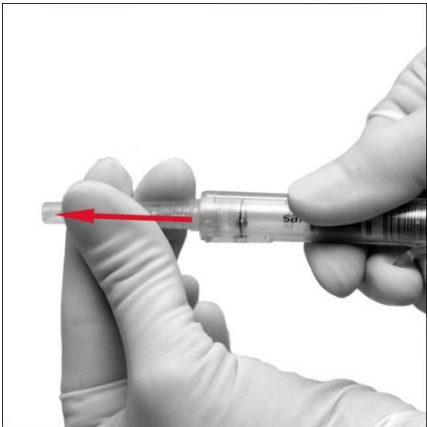

Afdæk kanylen ved at holde fast i kanylebeskytteren med den ene hånd og trække kanylehætten lige af, uden at dreje med den anden hånd.

Udfør prøvetagning som beskrevet i PRI [Arteriepunktur](#)


Figur 2: Afdæk kanylen, og udtag prøven

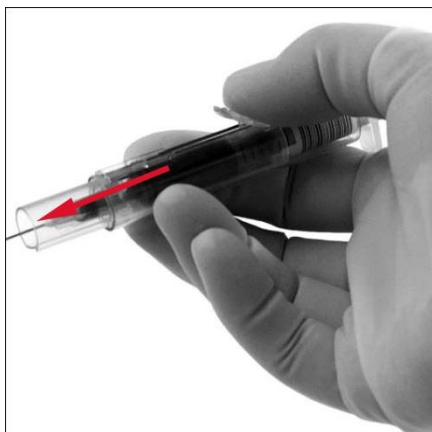

Figur 3: Udløs beskyttelsehætten

Hold fortsat sprøjten i én hånd og placer tommelfingeren på fingerpladen. Undgå at presse nedad på fingerpladen, mens beskyttelsehætten forsigtigt skubbes ud over kanylen, til der høres et klik. Klikket indikerer, at beskyttelsehætten er forsvarligt fastlåst. Brug eventuelt begge hænder.

OBS: Fingerpladen kan med fordel "løsnes", ved at skubbe denne én gang lidt frem og tilbage inden prøvetagning.

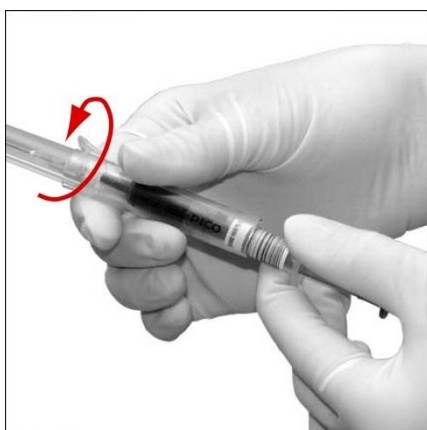

Figur 4: Fjern kanylen

Fjern kanylen og kanylebeskytter ved at holde fast i sprøjtes fingergreb med den ene hånd, mens kanylebeskytteren drejes med den anden hånd. Kassér kanylen og kanylebeskytter i en kanyleboks.



Figur 5: Udluft prøvematerialet

Hold sprøjten med den ene hånd, og placér safeTIPCAP (løst vedlagt) på sprøjtes studs, hvorefter den "drejes" fast. (Den skal ikke fjernes igen). Bank let på sprøjten for at lede luftbobler op øverst i sprøjten.



Figur 6: Udluft al luft fra prøvematerialet

Tryk forsigtigt på stemplet for at lukke luften ud af prøven, og tryk indtil modstanden indikerer, at TIPCAP er forsegleet.

Herefter er prøven klar til opblanding.

Minimum 8 vendinger umiddelbart efter forsegling



Prøven kan placeres i ABL8xx FLEXQ, med automatisk opblanding og analyse.

For sikker identifikation af patient og prøvetager benyttes FlexLink

Figur 7: safePICO sprøjter kan analyseres på ABL8xx FLEXQ

Har du spørgsmål til brugen af safePICO sprøjter, bedes du henvende dig til Klinisk Biokemisk på tlf. 64 912