



# Thopaz<sup>+</sup>™ Quick Card

 Dette Quick card erstatter ikke brugsanvisningen REF 200.6841 og omhandler firmware 1.01



## 1. Montering

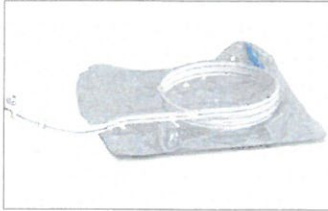

1. Åbn den sterile slangeindpakning
2. Lad patienttilslutningen være i intern pose

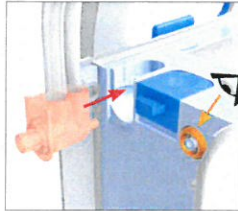

3. Kontrollér, at den orange forsegling er der
4. Fastgør slangen

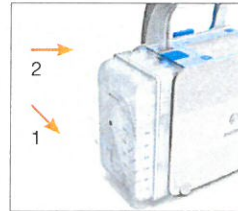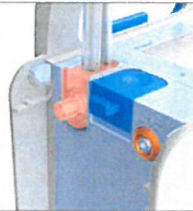


5. Isæt bunden af beholderen først
6. Klik toppen af beholderen på plads



7. Thopaz<sup>+</sup> systemet er tilsluttet og klar til at blive tændt

## 2. Tænd apparatet

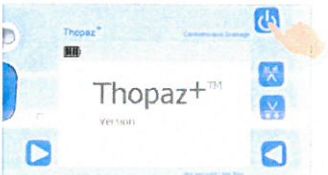


1. Tænd Thopaz<sup>+</sup>
2. Angiv, om det er en ny patient, der er tilsluttet




3. Kontrollér den registrerede beholderstørrelse (forkert registrering: bortskaf beholder)
4. Thopaz<sup>+</sup> er klar til funktionskontrol

## 3. Udfør funktionskontrol

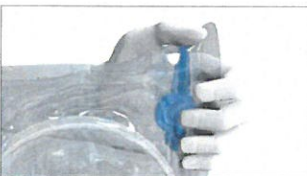

1. Forsegl slangen (hold den steril)

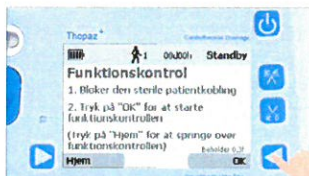

2. Tryk på "OK"  
**Test består:** Fortsæt  
**Test ikke består:** Følg vejledningen i brugsanvisningen REF 200.6841




3. Slut Thopaz<sup>+</sup> til patienten i henhold til hospitalets retningslinjer
4. Start behandlingen ved at trykke på „Tænd“

## 4. Justér trykket under drift



1. Tryk samtidig

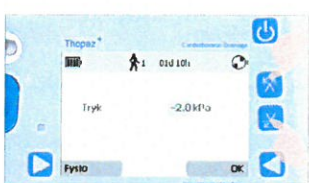


2. Indstil det ønskede tryk




3. Bekræft med „OK“

## 5. Kontrollér behandlingsforløb

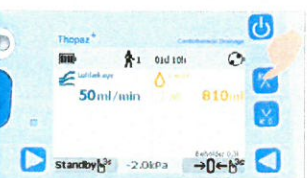


1. Kontrollér luftlækagehistorik

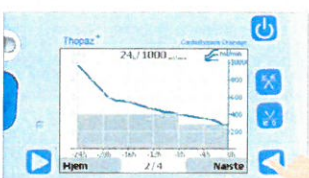

2. Brug knappen „Næste“ til at rulle i luftlækagegrafer



3. Kontrollér væskehistorik

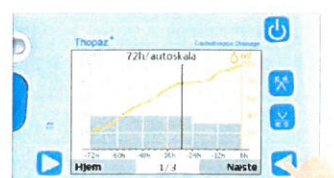

4. Brug knappen „Næste“ til at rulle i væskegrafer

## 6. Nulstil væskevisning




1. Tryk på knappen til nulstilling af væske i 3 sekunder



2. Timeren viser, hvornår parameteret senest blev nulstillet. Visningen kan nulstilles efter behov ved igen at trykke på knappen væskehistorik i 3 sekunder.


## 7. Udskift beholder

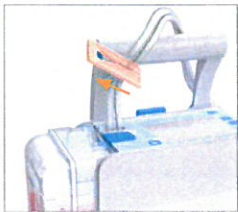

1. Forbered en steril beholder  
2. Afklem slangen



3. Skift Thopaz+ til standby-indstillingen (tryk i 3 sekunder)

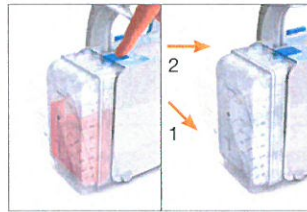

4. Udskift beholder




5. Kontrollér den registrerede beholderstørrelse (forkert registrering: bortskaf beholder)



6. Tryk på „Tænd“, og frigør slangen




7. Kontrollér, at lækgeværdien synes korrekt

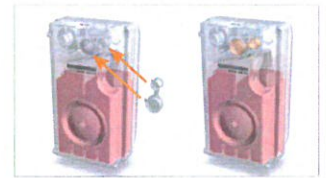


8. Forsegl og bortskaf beholderen i overensstemmelse med hospitalets interne retningslinjer

## 8. Alarmer

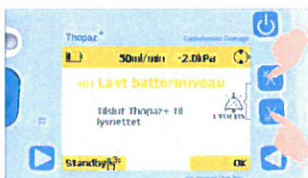

1. Tryk samtidig for at slukke den akustiske alarm

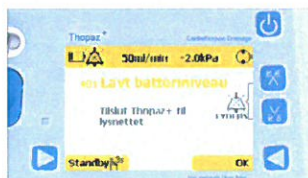

2. Følg instruktionerne på skærmen

## 9. Kateterkontrol

Brug kun med et patientkateter (dræn) i det interpleurale rum.



1. Åbn luftlækagehistorik  
**Bemærk:** Kateterkontrol er kun aktiv, hvis luftlækagen er 0 ml/min.



2. Gå til side 4/4 ved at trykke på „Næste“  
3. Følg instruktionerne på displayet

## 10. Slukning af Thopaz+



1. Afklem kateter  
2. Afklem slangen



3. Skift Thopaz+ til standby-indstillingen (tryk i 3 sekunder)



4. Sluk Thopaz+  
5. Aftag og forsegl beholderen  
6. Bortskaf beholderen og slangen i overensstemmelse med hospitalets interne retningslinjer.  
7. Rengør og desinficér Thopaz+ som beskrevet i brugsanvisningen REF 200.0681 (generelle retningslinjer for rengøring)

