

Tjekliste for hjertestopvogn og defibrillator (bilag 1)

Afdeling:

Nattevagten tjekker dagligt:

- Defibrillator skal være sluttet til el-stik.
- Lampen til defibrillatorens batteri skal lyse.
- Dokumenteres på særskilt skema. (bilag 2)

Nattevagten tjekker ugentligt – hver XXX

- At defibrillatoren fungerer: stød udløses med XXX Joule, skal gøres med afbrudt stikkontakt.
- Stikkontakten sættes til straks efter testen, så batteriet hele tiden er opladet.
- Det dokumenteres på nedenstående skema, at der er udført tjek med dato og initialer.

Såfremt der findes noget at bemærke i forhold til daglig eller ugentligt tjek, meldes det hurtigst muligt til teknisk afdeling pr. telefon eller via DIS-systemet.

Teknisk afdeling fører periodisk kontrol med defibrillatoren, og dokumenterer det via DIS-systemet.

Derudover tjekkes

- at defibrillatoren er ren – aftørres med opvredet sæbeklud
- stik og ledninger er intakte
- udløbsdato på stødelektroder (pads)
- at der er papir i printereren
- at elektroder til overvågning forefindes i nettet på defibrillatoren

Her kan der indsættes en vejledning i hvorledes den enkelte afdelings defibrillator fungerer.

Indhold af hjertestopvognen skal være som følger:

- **Akutkasse** – som ikke må være anbrudt. Efter brug og kassen er anbrudt skiftes den som beskrevet i instruks for ”akut medicin”. Ekstra akutkasse forefindes på M1.
- **Hjertebræt** – hænger på bagsiden.
- **Skammel** – hænger på siden
- **Dropstativ** – sat fast på vognen.
- **Defibrillator** – som tjekkes som foreskrevet hver uge, dokumenteres på særskilt tjekliste.
- **Anæstesikuffert** – er intakt og fyldt op – dette er anæstesiens ansvar efter brug.
- **Elektroder til overvågning** – (obs udløbsdato)
- **Ventilationsballon** – monteret med ca. 2 meter plastslange
- **Sug** – funktion tjekkes
- **Væske** – 500 ml. isotonisk NaCl, 500 ml. Glucose. (obs udløbsdato)
- **1 dropsæt.**(obs udløbsdato)
- **Stopur** – til anvendelse under selve hjertestopbehandlingen. HUSK at trække det op!

