

AIRVO 2(+) - Betjeningsvejledning

(1) Vandkammer

Kammeret sættes i/fjernes ved at trykke den blå fingerplade ned og derefter køres kammeret ind/ud.

Sterilt vand tilsluttes kammeret.

Kammeret skal skiftes efter 14 dage.

Påsat det gule mærkat med ugedag + dato



(2) Opvarmet patientslange

Installering af patientslange:
Løft det blå plastik ærme op, og forbind slangen til enheden. Skub det blå ærme ned for at låse på plads.

Slangen skiftes som kammeret efter 14 dage


(3) Tænd/sluk knap

Tryk knappen ned i 2 sek. for at tænde, og Airvoen vil varme op.



(4) Display/skærm

Displayet viser følgende 'klar til brug' tegn når enheden er klar. Det tager ca. 5 minutter

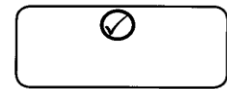

(5) Ændring af temperatur og totalflow

Når der trykkes på menuknappen ses temperaturen i displayet. Nøglen indikerer at indstillingen er låst. Der låses op ved at trykke på piletasterne OP+NED i 3 sek.

Temperaturen kan nu sættes ned til 34°C el 31°C. Ønskes flowet ændret trykkes på menutasten igen, indstillingen låses op og der kan nu skrues OP/NED på piletasterne.



(6) Afslut behandlingen + rengør

Hold tænd/sluk knappen nede i 3 sek. for at slukke apparatet.

Afmonter kammer og slange og smid det ud

Monter den røde slange som vist på billedet til venstre.

OBS indgangsporten til højre skal proppes med filteret.

Hold nu tænd/sluk knappen nede i 3 sek. O₂ cellen kalibreres, hvorefter renseprogrammet starter. Det varer ca. 55 min.

Efter endt rengøring skal apparatet slukkes. Det aftørres nu med engangs-sæbeklud.