



# Level/width forudindstilling i EasyViz

Aktiver Width/level menuen ved at klikke på trekanten på siden af knappen.

I menuen klikker du på "Redigér..."

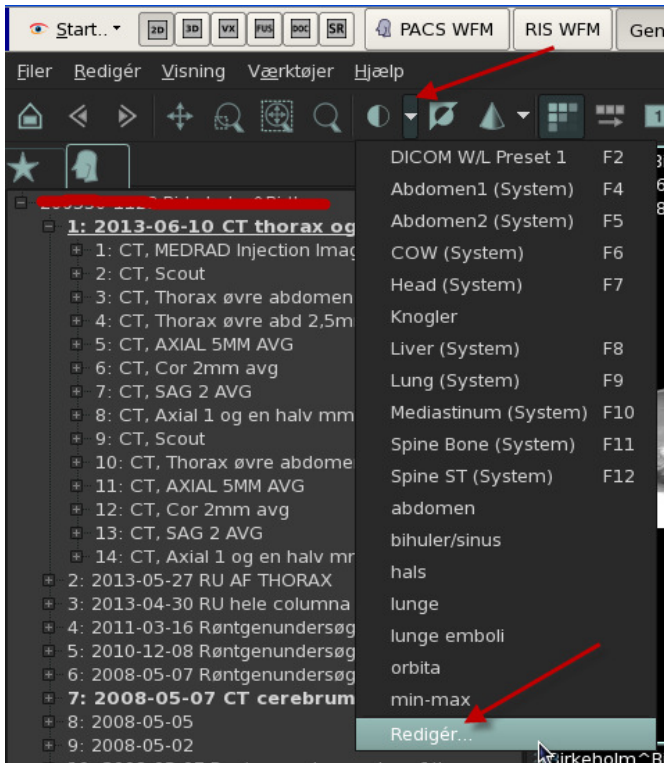


I billedet "Redigering af forudindstillinger" vælger du "Ny"

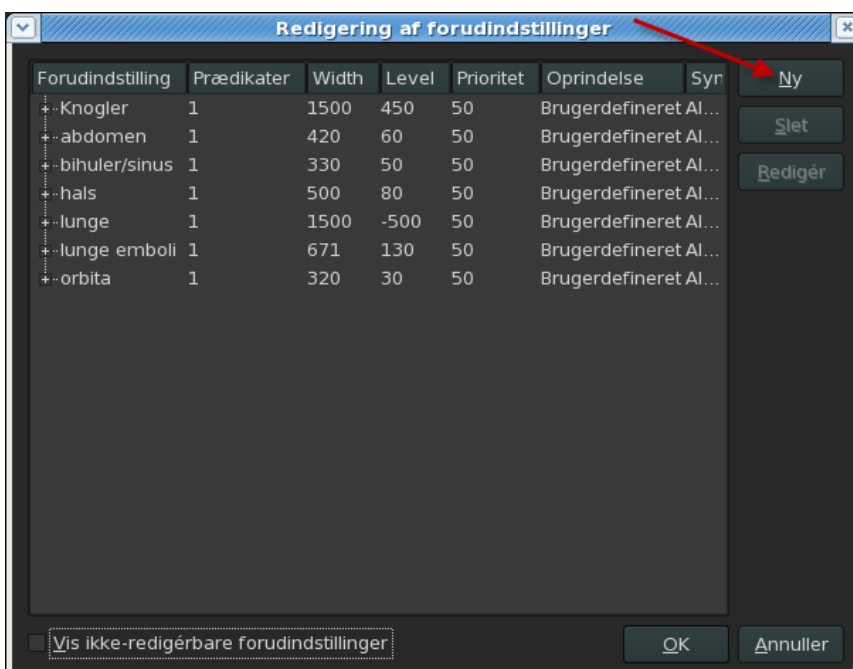

Underfanebladet "Generel" skal du:

- navngive forudindstillingen (fx Martins private testindstilling)
- indsætte værdier for Width, Level og prioritet

Når du har indtastet værdier under "Generel", klikker du på fanebladet "Prædikater"

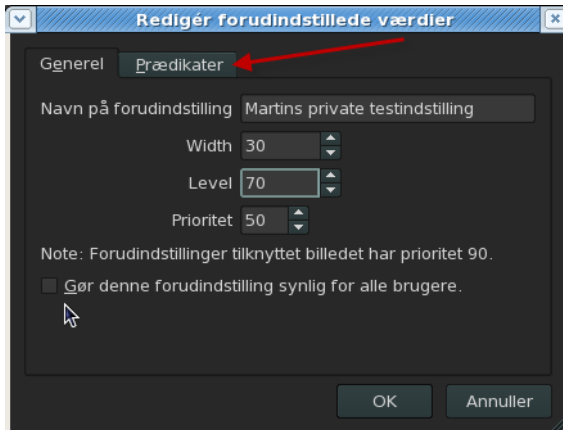


Under prædikater klikker du "Ny"



I menuerne vælges "DICOM-tag" (fx Modality) og "Udtryksmatch" (fx CT)


Klik "OK"

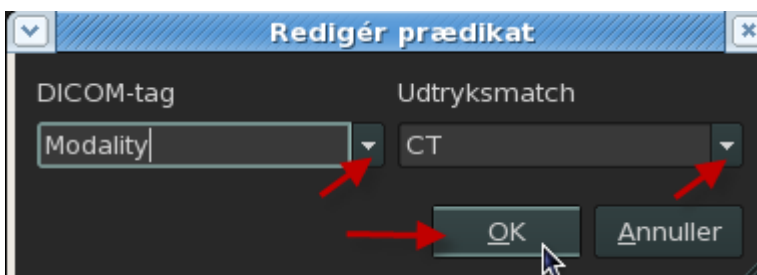


Klik "OK"



Tillykke, du har nu oprettet en forudindstilling af Width/level

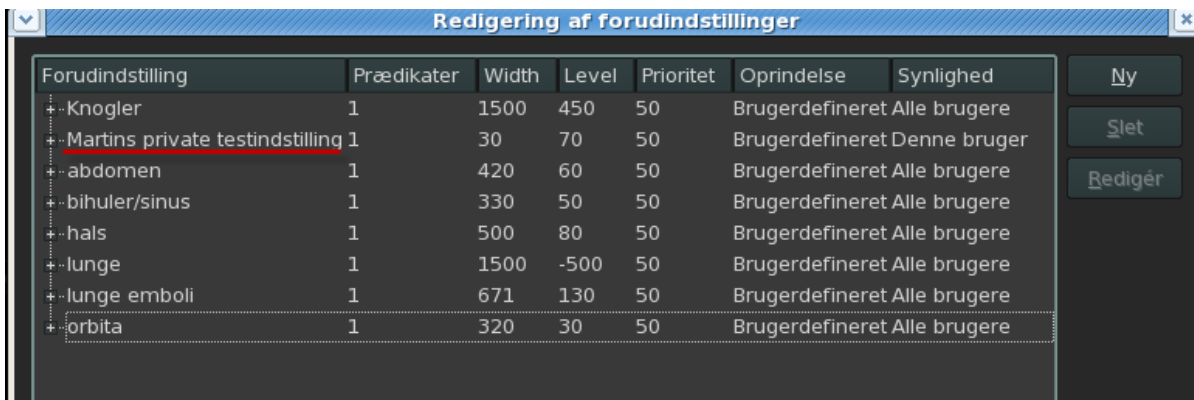


Den nye forudindstilling finder du i værktøjslinjen under Width/level

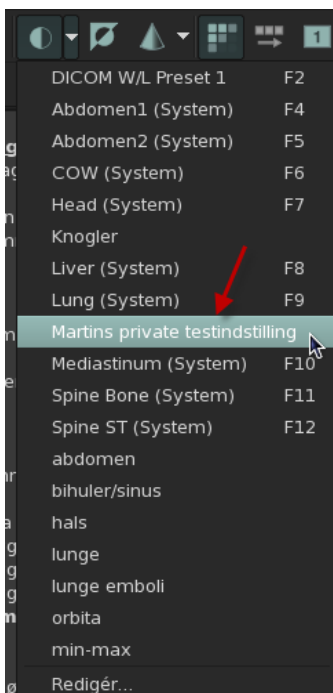


## Opsætning af genvej til Width/level forudindstilling


Under "Værktøjer" vælges "Tilpas genveje..."

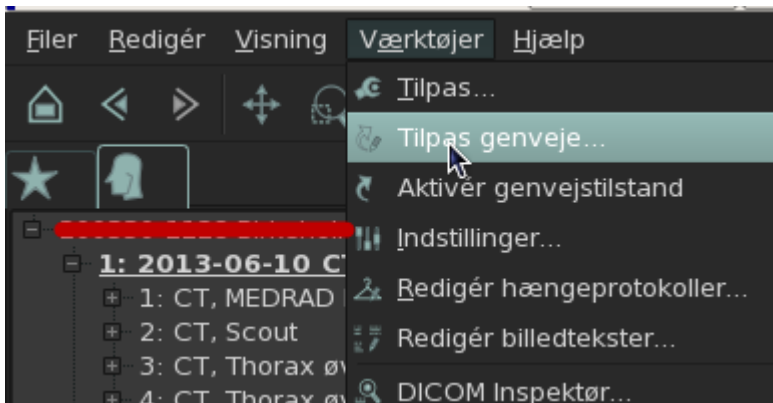

Find din nyoprettede forudindstilling under "LUT-forudindstilling" og klik "Rediger".

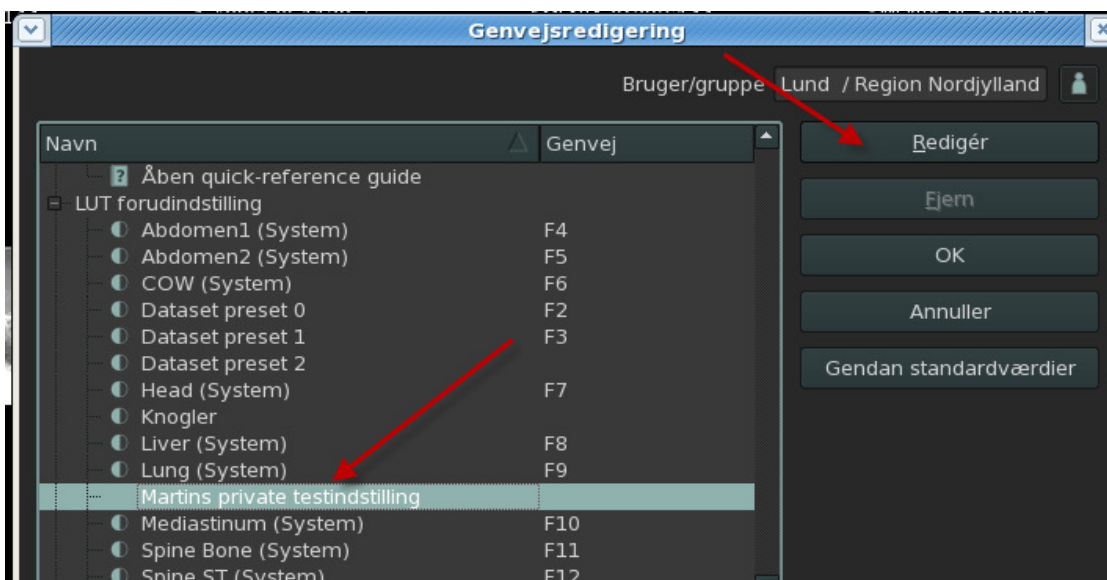

Indsæt genvej (fx Ctrl+1). Afslut med OK.

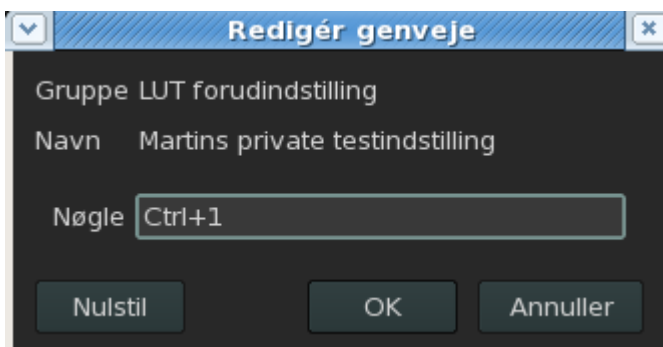

Tillykke, du har nu oprettet en genvej til din Width/level forudindstilling