

Startindstillinger	
Funktion	S/T
IPAP	10-14 cm H ₂ O
EPAP	4-6 cm H ₂ O
Respirations frekvens	10
Ti max	Efter tabel – obs valg af restriktiv, COPD eller normal lungfunktion
Ti min	0,1
Stigningstid	150 millisek.
Trigger	Medium
Cyklus	Medium
Max rampe	Fra
Start EPAP	Kan stå på 4,0. Er ikke aktiveret.
Maske	Full face
Slange	Standard
AB-filter	Ja
Ekstern fugter	Nej
Fugtighedsniveau	3,0
Læk alarm	Til
Bekræft stop	Til