

Actioncard for hjemmesygeplejersker

- Betragtes som et langtidsholdbart PVK og behandles som sådan, med følgende tilføjelser.
- Kan anvendes i op til 29 dage.
- Hånddesinfektion / håndvask.
- Injektionsport/membran desinficeres mekanisk med klorhexidinsprit 0,5% (uden glycerol) i min. 5 sec. før brug.
- Sikre at klemskrue ALTID er lukket, når kateteret er ”åbent”.
- Sprøjt igennem med 10 ml NaCl 0,9%.
- Tilslut medicin.
- Efter medicinadministration gennemskylles med 10 ml. NaCl 0,9%.
- Påsæt ny steril prop (hvis ikke der er påsat injektionsmembran).
- Hånddesinfektion / håndvask.

HEPARINISERING:

- Ikke nødvendigt.

KATETER DER IKKE ER I BRUG:

- Skylles dagligt med 10 ml NaCl.*

SKIFTNING OG SKYLLE RUTINER

- Injektionsmembran skiftes hver 4. dag eller ved synlig forurening/blod.
- Anvend altid 10 ml sprøjter.
- Skyl med 10 ml NaCl før, mellem og efter injektion eller infusion.
- Skyl med 2 x 10 ml NaCl efter blodprodukter.
- Forbinding og Statlock skiftes hver 7. dag, eller hvis urent eller beskadiget.

BLODPRØVETAGNING:

- Bør undgås

Actioncard for hjemmesygeplejersker

BADNING:

- Klip plastpose til rør, sæt ud over forbindelse og tape på hver side.

SEPONERING AF KATETERET:

- Træk forsigtigt i venens retning. Påsæt steril plaster.

I TILFÆLDE AF TILSTOPNING - trin for trin:

- Luk klemskruen og tag injektionsmembranen af; Forsøg nu gennemskylning uden.
- Tjek knæk på slange, alle haner åbne osv.
- En simpel gennemskylning med 10-20 ml NaCl kan være nok til at genoprette kateterets funktion.
- **For telefonvejledning:**
Ring til vagthavende anæstesisygeplejerske på 97650451
- **For tilsyn:**
Ring til visitator på 97650543 i Akutmodtagelsen.

