


ISOCENTRERING tilpasning fra skankonsol

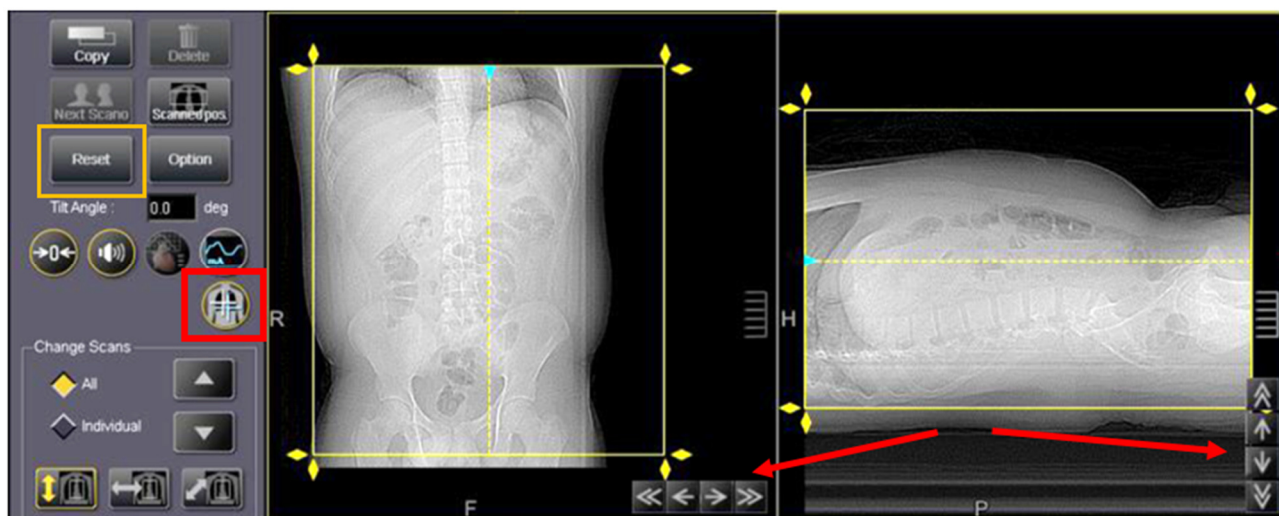

Tilpas højde og sideforskydning **INDEN** der flyttes på den gule planlægningsboks for skanområdet.

Klik på ikonet for centrering, **RØD BOKS**, og tilpas med pilene i bunden af scanogrammerne.

Er du kommet til at justere på skanområdet, så klik **RESET**, **gul boks**, og start forfra.

Efter dette planlægges skanområdet som vanligt.

Ved CONFIRM lyser positioneringsknap på tastaturet. Hold knappen nede til højden er justeret og gentag hvis lejet også skal køres til siden.

FJERN KONTRAST fra en protokol

1. Markér serie **S&V** og derefter **Delete**

2. Markér serien **Surestart** og derefter **Delete**

3. Skriv 0 i feltet **Wait**- tast Return!

4. Klik på kontrastikon og ikon for synkronisering til injektor, så knapperne bliver hvide

5. Confirm og scan 😊

1	P	***	***	606.5	1606.5	DualScano
2	A	***	***	1606.5	606.5	DualScano
3	P	***	0.0	606.5	606.5	S&V
4	P	***	15.0	***	***	SureStart
5	A		40.0	656.5	1256.5	vHP

Buttons: Copy, New Scan, Delete

No	Start	Start Time	Wait	Start Pos	End Pos	Scan Mode
1	P	***	***	606.5	1606.5	DualScano
2	A	***	***	1606.5	606.5	DualScano
3	P		0.0	656.5	1256.5	vHP

Buttons: CE, Injector