

KONSTANSTEST ORTOPAN (RTG 1)

Forberedelse

- Sekretær opretter henvisning på Røntgen Røntgensen 0303030XX3
- Laves konstanstest på flere "rum" på samme dag, kan henvisningen genbruges
- Find skema i X – basen
 - o – Personale net (personalenet.rn.dk)
 - o – andre intranet
 - o – info fra Røntgen fysik

- Til konstanstest af ortopan skal LILLE referencekassette være ny clearet
- På selve ortopanen placeres "trappen" på pladen foran kassette holderen (mellem tusch stregerne)

- Som undersøgelse vælges ortopan

- Når billedet er taget aflæses kassetten og billedet sendes til PACS

- Måling sker på billedet i PACS
 - o brug altid højre side af billedet
 - o ROI så tæt på 3,0 som muligt eller 30 mm²
 - o ROI placeres 10 mm ind fra højre kant
 - o ROI på 6.trin talt fra de lyse trin
 - o Aflæs middelværdien – denne noteres i x-base skema