

## Mobiletter (traume stuen, intensiv og pæd)

### Forberedelse

- Sekretær opretter henvisning på Røntgen Røntgensen 0303030XX3
- Laves konstanstest på flere "rum" på samme dag, kan henvisningen genbruges
- Find skema i X – basen
  - o – Personale net (personalenet.rn.dk)
  - o – andre intranet
  - o – info fra Røntgen fysik
- Portøren henter mobiletterne

### På røntgen stuen

- På mobiletten vælges Test og konstanskontrol
- Den "gamle" konstansplade lægges på mobilettens detektorplade (denne uden raster)
- FFA 90 cm med røntgen rør i vatter
- Feltstørrelse 18x24
- Stativ med dosismåler (uden patient ækvivalent filter) placeres i hullerne på konstansplade
- Billedet tages og dosis aflæses
- På mobilettens billedskærm "blændes ud" og mobilettens nr. påføres billedet inden dette sendes til PACS

### Analyse i PACS

- Dosis (**mAs** samt **mGy**) noteres i x-base skema
- Største afvigelse stråle/lys i cm noteres i x-base skema
- Opløsning LP/mm noteres i x-base skema