

Led væske til bestemmelse af alfa-defensin indhold

Prøveglas: Den del af ledvædsken, som skal analyseres for alfa-defensin, skal i alm. steril spidsglas eller WR-glas med rødt skruelåg.

Forsendelse: Alfa-defensin-glasset sendes til **Klinisk Immunologisk afdeling AAUH Nord** via prøve-fordelingsrummet på 2. sal på AAUH Syd.

Hvis glasset skulle "smutte" forbi prøve-fordelingsrummet og ender på Mikrobiologisk afdeling sammen med glassene til mikrobiologisk undersøgelse henstilles, at alfa-defensin-glasset hurtigst mulig sendes til Klinisk Immunologisk afdeling AAUH Nord.

Prøvemateriale skal være Klinisk Immunologisk Afdeling i hænde senest 48 timer efter prøvetagning.

Opbevaring: Glasset skal holdes kølet bedst mulig i hele forløbet (køleskab).

Prøvemateriale centrifugeres og fryses v. -80°C inden 48 timer.

LABEL:

Prøvetagningstidspunkt :

Rekvirerede læge + tlf:

Ved spørgsmål kontakt :

Funktionsansvarlig bioanalytiker, Eva Ravn Poulsen, DECT 65609, erp@rn.dk, (Alb Blodbank og klin. immunolog)

Overlæge, Andreas Kappel, DECT 62500, andreas.kappel@rn.dk, (ortopædkirurgisk afdeling)