

Quick guide: Analysering af sprøjte på ABL8xx

- Apparatet skal vise **Klar**, før en prøve kan analyseres.
- Hvis pauseskærmen er aktiv, berøres skærmen og der **indtastes eller indskannes kodeord** efterfulgt af ↵

Følg proceduren nedenfor:

1. **Løft inlet-flappen** til sprøjter.
Følgende skærm vises:



2. **Placer sprøjten i inlet.**



*NB. Der må ikke sprøjtes ind.
Prøven suges automatisk ind.*

3. **Vælg metode.** Arteriesprøjte – S 195 µL
4. **Tryk på *Start*.**
5. **Prøven suges ind**, og skærmen med patient-identifikation kommer frem.
6. **Fjern prøven og luk inlet-flappen** efter endt indsugning.

Når du indlæser patient-identifikation så:

- a. **Fremhæv feltet** med fingertryk.
- b. **Indtast/skan patientens CPR-nr.** Eksempel: 1234561234

7. **Når resultatbilledet kommer frem:** For at få svarene lagt ind i LabkaII

Tryk på **"Godkendelse"**
Tryk på **"Godkend"**
Tryk på **"Accepter"**

8. **Efter endt analysering logges af**

I tilfælde af problemer, kontakt Klinisk Biokemisk Afdeling.