

# Analysering af arteriesprøjte på ABL8xx, Frederikshavn

ABL skal vise **Klar**, før en prøve kan analyseres.

Hvis pauseskærmen er aktiv, berøres skærmen og der **indtastes eller scannes personlig kode efterfulgt af ←**

## 1. **Løft inlet-flap** til sprøjter (den venstre flap)



## 2. **Placer sprøjten i inlet**



*NB. Der må ikke sprøjtes in  
Prøven suges automatisk ind.*



## 3. **Vælg metode.**

## 4. **Tryk på Start**

## 5. **Prøven suges ind**, og skærmen med patient-identifikation kommer frem.

## 6. **Fjern prøven og luk inlet-flap** efter endt indsugning.

Når du indlæser patient-identifikation så:

- Fremhæv feltet med fingertryk**
- Indtast eller scan patientens CPR-nr.**  
(kba anvender 12 cifret prøvenummer)
- Indtast prøvetype "Arteriel"**



## 7. **Når resultatbilledet kommer frem:** For at få svarene overført til Labka

Tryk på **"Godkendelse"**

Tryk på **"Godkend"**

Tryk på **"Accepter"**

## 8. **Efter endt måling logges af**

I tilfælde af problemer, kontakt Klinisk Biokemisk Afsnit.