

Bilag 7 – Vejledning til ernæringspumpe Flocare Infinity

Eksempel 1

Kontinuerlig indgift (f.eks. 500 ml med 125 ml/t)

Vejledning til opsætning og programmering:

1. Tilkobl sondeernæringen på ernæringssettet
2. Tryk på "ON/OFF"
3. Nulstil tidligere indgivet mængde ved at trykke kortvarigt på "CLR" (hvis den ikke i forvejen er nulstillet)
4. Fyld ernæringssettet via pumpen ved at trykke på "Fill set"-funktionen
5. Indstil mængden der ønskes at indgive (f.eks. 500 ml) ved tryk på "volumen ml". Juster med +/-
6. Indstil hastigheden (f.eks. 125 ml/t) ved at trykke på "ml/t"
7. Tryk på start
8. Undervejs kan du løbende se, hvor mange ml, der er givet ved at trykke på "info"
9. Ernæringspumpen alarmerer, når den angivne mængde er givet
10. Stop alarmen ved tryk på "start/stop"
11. Nulstil pumpen ved tryk på CLR
12. Sluk pumpen ved tryk på "ON/OFF"

Eksempel 2

Intermitterende indgift (f.eks. 200 ml på 30 min.)

Vejledning til opsætning og programmering:

1. Tilkobl sondeernæringen på ernæringssettet
2. Tryk på "ON/OFF"
3. Nulstil tidligere indgivet mængde ved at trykke kortvarigt på "CLR" (hvis den ikke i forvejen er nulstillet)
4. Fyld ernæringssettet via pumpen ved at trykke på "Fill set"-funktionen
5. Indstil mængden der ønskes at indgive (f.eks. 200 ml) ved tryk på "volumen ml". Juster med +/-
6. Indstil hastigheden (f.eks. 400 ml/t) ved at trykke på "ml/t"
7. Tryk på start
8. Undervejs kan du løbende se, hvor mange ml, der er givet ved at trykke på "info"
9. Ernæringspumpen alarmerer, når den angivne mængde er givet
10. Stop alarmen ved tryk på "start/stop"
11. Nulstil pumpen ved tryk på CLR
12. Sluk pumpen ved tryk på "ON/OFF"

<http://www.nutricia.dk/wp-content/uploads/2017/11/Flocare-Infinitypumpe.pdf>