


Afsendelse af hjertestop data

Indtast CPR-nummer



Indtastning af patientoplysninger gøres i **EKG-12 menuen**

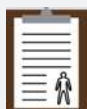

Tryk på hurtigadgangsknappen **Patientoplysninger**
Indtast navn og CPR-nummer.



Tryk på **Afslut EKG-12**

Vælg / luk sagen



Tryk på hurtigadgangsknappen **Log**



Tryk på hurtigadgangsknappen **Overførsel af log med data**
Tryk på **Luk sag**

Send casen

Vælg den case, du vil overføre, og tryk **Overfør**

Hvis du vil sende **EKG-12 til PCI-vagten**, skal du IKKE følge denne vejledning. **VEND** i stedet kortet og følg vejledningen på den anden side.