



7. september 2021

SWR

Vejledning til manuel programmering af CADD-pumpe når piperacillin/tazobactam ordination ikke stemmer overens med tilgængelig pose

Vejledning indeholder:

- Ordination på 12 g pip/taz og kun 16 g pip/taz pose tilgængelig
- Ordination på 8 g pip/taz og kun 16 g pip/taz pose tilgængelig
- Ordination på 8 g pip/taz og kun 12 g pip/taz pose tilgængelig

- Tænd pumpe på hovedafbryder på siden af pumpen
- Vælg "opgaver"
- Tryk pil ned for at vælge "avancerede opgaver" og tryk "vælg"
- Tryk pil ned for at vælge "Start ny patient" og tryk "vælg"
- Tryk fuldførelse af denne opgave tryk "fortsæt"
- Tryk kode "201" og tryk "accepter værdi"
- Tryk pil ned for at vælge "kontinuerlig" og tryk "vælg"
- Tryk pil ned for at vælge "programmér manuelt" og tryk "vælg"
- Skriv kode "921" - tryk accepter værdi
- Svar på er disse rigtige, vælg "ja"
- "Gennemgå pumpeindstillinger" vises nu - tryk gennemgå
- Vælg infusionshastighed = kont. hastighed – tryk vælg og indstil denne jf. skema – tryk gem
- Vælg "reservoir volumen" og indstil denne jf. skema - tryk gem
- Accepter de to værdier så der kommer et grønt ✓ ud for hver værdi
- Når begge værdier er accepteret vælg "næste"
- Pumpen er nu klar til brug og kan påsættes infusionspose
- Når pumpen stopper efter 24 timer kasseres posen med restmængden

Ordination Piperacillin/tazobactam	12 g	8 g	8 g
Pose størrelse tilgængelig	16 g	16 g	12 g
Infusionshastighed= kont. hastighed	10 ml/time	6,7 ml/time	6,7 ml/time
Reservoir volumen	240 ml	160 ml	160 ml