




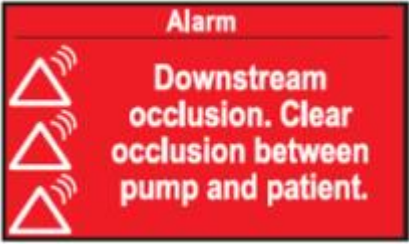

## Quick problemløser til CADD-SOLIS VIP pumpe

1		<p><b>1. Rød alarm – "Okklusion nedadgående. Ryd okklusion mellem pumpe og patient"</b></p> <p><b>A:</b> Kan være en klemkrue mellem pumpe og patient som ikke er blevet åbnet.</p> <p><b>B:</b> Der kan findes et knæk på slangen.</p> <p><u>Løsning:</u> Åben for alle klemkruer og afklar om der findes et knæk på slangen. Pumpen vil fjerne alarmen når problemet er løst og pumpen fortsætter infusionen.</p>
2		<p><b>2. Orange alarm – der opstod strømafbrydelse mens pumpen kørte, skift batterier</b></p> <p><b>A:</b> Pumpen er ved at løbe tør for strøm og batterier skal skiftes.</p> <p><u>Løsning:</u> Åbn kammer ovenpå pumpen, ved at dreje på armen. Skift da batterierne og luk igen. Tænd pumpen på siden og tryk på "start" når billedet kommer frem.</p>
3		<p><b>3. Orange Alarm – Reservoir volumen lav</b></p> <p><b>A:</b> Pumpen gør blot opmærksom på at der er meget lidt væske tilbage i infusionsposen.</p> <p>Tjek reservoir i posen, da det kan være glemt at nulstille reservoir volumen ved skift af infusionspose.</p> <p><u>Løsning:</u> Tryk "acceptér" og "start".</p>

4		<p><b>4. Rød alarm – Luft i slange detekteret. Tryk på "Acceptér", og fyld så slangerne</b></p> <p><b>A:</b> Her er problemet luft i slangen, og pumpen vil bede om at luften fjernes før den kan køre videre.</p> <p><b>Følg nedenstående instruktion og brug evt. billederne ovenover</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tast "acceptér".</li> <li>2. Tast "opgaver"</li> <li>3. Pumpen skriver "Fyld slange". Tast "ja"</li> <li>4. Pumpen skriver "Frakobl slange fra patienten". Her skal du ikke frakoble patienten, men tast "fyld". Den mængde luft som kan være i slangen er ikke farlig for patienten, og kan derfor godt primes igennem.</li> <li>5. Pumpen primer manuelt, og stopper derfor først når du trykker stop. Lad pumpen prime ca. 2,3ml igennem, og tast da "stop". Pumpen skriver "forsæt fyldning". Tast "nej".</li> <li>6. Pumpen skriver "start pump". Tast "ja"</li> </ol>
5		<p><b>5. Rød alarm – Okklusion opadgående. Ryd okklusion mellem pumpe og reservoir</b></p> <p><b>A:</b> Der findes et problem mellem kassettebeslag og pumpen  <u>Løsning:</u> Lås låsearmen op, tag kassettebeslag af og sæt dette på igen.</p> <p><b>B:</b> Der er en klemskrue som ikke er åben.  <u>Løsning:</u> Undersøg om alle klemskruer er åbne og at der ikke findes et knæk på slangen.</p>