

Quick guide POCT-CRP – på QuikRead go wrCRP

Tænd QuikRead go – hold knappen inde i et par sekunder.

Vælg "Logon"

Scan/tast dit brugernavn.



Vælg "Måling" på QuiRead Go display



Scan patientens CPR fra armbånd eller Sundhedskort. Klargør kuvette og 10 µl rør med stempel



Fyld røret med blod fra øre eller finger. Tør overskydende prøvemateriale af røret



Anbring blodprøven i buffer, og tryk stemplet ned



Luk kuvetten tæt med et wrCRP reagenslåg



Placer kuvetten i QuikRead, som vist på display.



Når målingen er gennemført overføres det viste svar til EPJ