

Maysound Music Player

Kære kunde

Tillykke med din nye Maysound Music Player. For at gøre det så nemt som muligt at komme i gang med din Maysound Music Player, anbefaler vi dig at læse denne brugervejledning. Hvis du efterfølgende har spørgsmål eller problemer, kan du altid kontakte Maysound ApS på: www.maysound.com/support

Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Maysound ApS er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder, typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne brugervejledning, ej heller i tilfælde af skader eller indirekte mangler, der skyldes brugen af dette materiale.

Denne brugervejledning indeholder oplysninger, som er beskyttet i henhold til lovgivningen om ophavsrettigheder. Ingen dele af denne brugervejledning må fotokopieres eller reproduceres uden forudgående tilladelse fra Maysound ApS. Produktnavne i denne vejledning kan være varemærker og/eller registrerede varemærker for de respektive virksomheder.

Registrer dit produkt på vores website www.maysound.com/register, for at sikre, at du får oplysninger om gratis softwareopdateringer til produktet.


Med venlig hilsen
Maysound

Alle oplysninger i denne vejledning var rigtige på tidspunktet for offentliggørelsen. Da vi løbende opdaterer og forbedrer produkterne, kan softwaren være lidt anderledes og se lidt anderledes ud. Funktionaliteten kan være ændret i forhold til det som står i denne vejledning. En opdateret version af vejledningen kan hentes på: www.maysound.com/guide

Copyright © 2007. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt og udgivet af Maysound ApS

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion	
Leveringsomfang	24
Tilbehør	25
Ekstra behandlings programmer	25
2. Lær afspilleren at kende	
Betjeningspanel	26
Bagpanel	27
Display med baggrundsbelysning	28-29
3. Kom godt i gang / Installation	
Opladning af batteri	30
Indsæt/Skift SD kort	30
Installer afspiller på pude/stol	31
Tænd/Sluk, skift nummer, lydstryke	31
Indstilling af timer	32
Tilslutning af ekstern lydkilde	33
4. Sikkerhed og rengøring	
Afmonter strømforsyningen, undgå høreskader osv.	34-35
5. Tekniske specifikationer	
Formater, batterilevetid osv.	36-37
6. Opdater Maysound Music Player	
Formål, vejledning	38-39
7. Håndtering, godkendelser og bortskaffelse	
Vigtige oplysninger	40-41

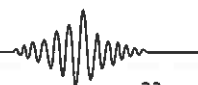

1. Introduktion

Leveringsomfang

Undersøg at det medfølgende tilbehør/leveringsomfanget, svarer til det som er beskrevet/illustreret nedenfor. Hvis noget af tilbehøret mangler kontakt da forhandler/leverandør omgående.



1 stk. Maysound Music Player



1 stk. Maysound SD kort med behandlingsmusik



1 stk. Maysound Strømforsyning (Medico Class 2 godkendt)



1 stk.. Maysound Music Player Quick User Guide

TIP: Smid ikke emballagen væk. Selve kassen kan anvendes som transport- og/eller opbevaringskasse. Skulle Maysound Music Player en dag sendes med posten, er emballagekassen den bedste indpakning til forsendelse.

Tilbehør

Nedenstående ekstra tilbehør kan købes hos Maysound forhandlere, læs mere på: www.maysound.com



Maysound Fjernbetjening (fjernbetjening)



Maysound Kabellås (tyverisikring)



Maysound Strømforsyning (Medico Class 2 godkendt)



Maysound Lydkabel (til ekstern lydkilde)



Maysound SD kortlæser (overfør MP3 filer til SD kort)

Ekstra behandlingsprogrammer




Der vil løbende blive udgivet nye behandlingsprogrammer på SD kort til Maysound Music Player. Behandlingsprogrammerne kan købes hos Maysound forhandlere, læs mere på: www.maysound.com



2. Lær afspilleren at kende

Maysound Music Player er designet så den er let og intuitivt at bruge. Knapperne er store og lyser op ved betjening. Displayet er let at aflæse også i mørke. Med den ergonomisk korrekte fjernbetjening fra Maysound (ekstra tilbehør) er det nemt for brugeren at betjene afspilleren.


Betjeningspanel

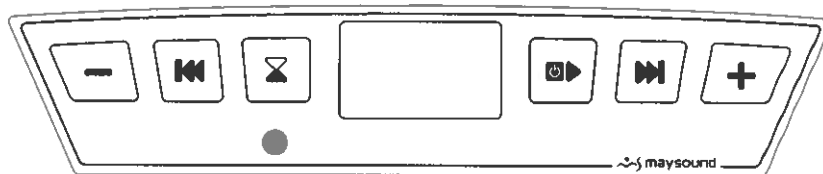

- Lydstyrke ned – ved tryk på knappen justeres lydstyrken ned.
- ⏮** Skift til forrige nummer – et nummer for hvert tryk.
- ⌚** Timer – sæt playeren til at slukke/tænde efter 15, 30, 45, 60, 120 min.
Holdes knappen nede i fem sekunder udføres reset.
- ⏻** Start/Stop – tænder afspiller, skifter mellem play og stop.
Holdes knappen nede i to sekunder slukkes afspilleren.
- ⏭** Skift til næste nummer – et nummer for hvert tryk.
- +** Lydstyrke op – ved tryk på knappen justeres lydstyrken op.

Bagpanel

Bag hygiejneflappen på afspillerens bagside er følgende tilslutningsmuligheder:

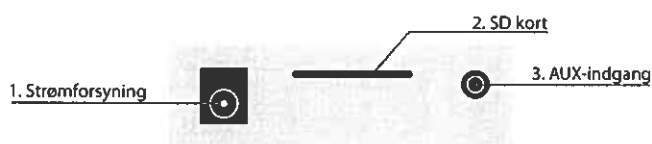

1. Indgang til strømforsyningen – opladning af batteriet.



Maysound Strømforsyning (Medico Class 2) – bruges til opladning af det interne genopladelige lithium batteri.

2. Indgang til SD kort – skub det medfølgende SD kort, eller et andet SD kort med lydfiler, ind med labelsiden opad.



Maysound SD kort med behandlingsmusik

3. Indgang til ekstern lydkilde (AUX-indgang) – tilslutning med Maysound Lydkabel (mini-jack) til f.eks. MP3 afspiller, fjernsyn eller anden ekstern lydkilde (Maysound Lydkabel kan fås som ekstra tilbehør). Justering af volumen skal ske på den tilsluttede enhed.

VIGTIG: Der skal anvendes et Maysound Lydkabel. Kablet må max være 2 meter langt.



Display med baggrundsbelysning


Baggrundsbelysningen i displayet og knapper tænder ved aktivering af en vilkårlig knap. Belysningen slukker efter 15 sekunder uden aktivering af knapper.




Tilstand:



Indstillinger:

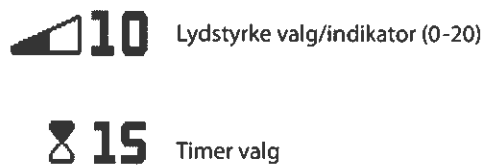

Timer:

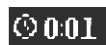

Samlet afspilningstid



Tid til timer-funktionen (tænd eller sluk) aktiveres (0-120 minutter)

Strømindikator:



Batteriet bør oplades



Batteriet er halvt opladt



Batteriet er fuldt opladet



Oplader tilsluttet og opladning er i gang




Oplader tilsluttet og opladning er afsluttet

Beskrivelse:



Titlen på det aktuelle musiknummer

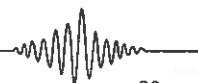


3. Kom godt i gang/Installation

Inden afspilleren bruges første gang skal det indbyggede batteri oplades.
 For at få det optimale udbytte af batteriet, bør det første gang oplades i 6 timer.

1. Opladning af batteri


Sæt opladeren i stikket i bagpanelet og sæt derefter stikket i stikkontakten.
 Displayets strømindikator viser at batteriet oplades.

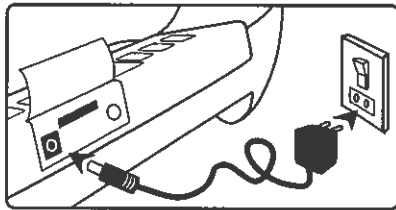

Når batteriet er fuldt opladet kan du se følgende ikon på displayet: 

2. Indsæt/Skift SD kort

Behandlingsprogrammet ligger krypteret på det medfølgende SD kort.
 Det er muligt at gemme egen musik/lydfile i MP3 format på et SD kort
 og afspille den på Maysound Music Player'en. Sæt SD kortet i afspilleren.

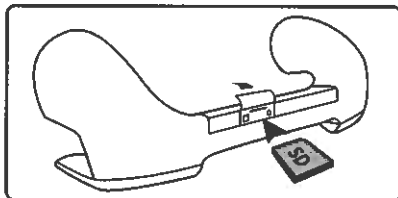

3. Placer afspilleren

Maysound Music Player kan anvendes på mange forskellige puder, madrasser og stole f.eks:



Normal pude



Formstøbt pude



Stoleryg

Dansk

4. Tænd/Sluk afspiller

Maysound Music Player tændes ved at trykke på Start/Stop-knappen 

Slukkes ved at holde Start/Stop-knappen nede i 2 sekunder.

Når Maysound Music Player er stoppet, slukker den automatisk efter 2 min.

Skift mellem musiknumre

 Skift til næste nummer


 Skift tilbage til forrige nummer

Justering af lydstyrken

Lydstyrken justeres i 20 niveauer.

 Juster lydstyrken op

 Juster lydstyrken ned

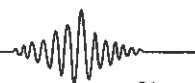

Indstilling af timer

Timer-funktionen  kan anvendes på 2 måder:

Tidsforskudt start

Denne funktion er specielt velegnet til opvågning.

Når afspilleren er i pause-tilstand vil tryk på timerknappen aktivere tidsforskudt start. Hvert tryk på knappen forlænger forsinkelsen før afspilning starter med 15 minutter op til 120 min.

Sættes tiden til 0, deaktiveres forskudt start. Afspilleren justerer langsomt lydstyrken op når tiden er gået.

Eksempel: Tænd for afspilleren og tryk derefter på timeren, indtil det ønskede antal minutter der skal gå, før afspilleren går i gang, står i displayet. Efter den valgte tid vil musikken starte meget stille og skruer langsomt op for lyden indtil det ønskede lydniveau er nået (indenfor 2 min.)

Tidsforskudt Sluk

Denne funktion er specielt velegnet til at falde i søvn.


Når afspilleren er i afspilletilstand vil tryk på timerknappen aktivere tidsforskudt sluk. Hvert tryk på knappen forlænger forsinkelsen før afspilleren slukker med 15 minutter op til 120 min.

Sættes tiden til 0 deaktiveres forskudt sluk. Afspilleren justerer langsomt lydstyrken ned når tiden er gået.

Eksempel: Tænd for afspilleren, tryk på start og derefter på timeren indtil det ønskede antal minutter der skal gå, før afspilleren skal stoppe, står i displayet. 2 minutter før den valgte tid vil musikken langsomt blive skruet ned og til sidst helt stoppe.

Tilslutning af ekstern lydkilde

For at afspille musik fra en anden lydkilde på Maysound Music Player, tilsluttes den eksterne lydenhed via et Maysound Lydkabel (kan købes hos Maysound forhandlere, læs mere på: www.maysound.com)

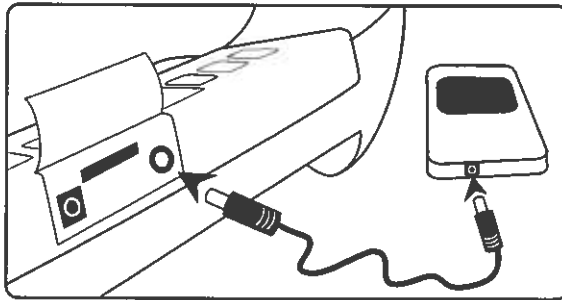

Dette ikon vises i displayet, når stikket er indsat korrekt.

Bemærk at lydstyrken skal justeres på den eksterne lydkilde ved tilslutning til Maysound Music Player.

Der henvises til kapitlet om sikkerhed og rengøring med hensyn til potentielle farer for høreskader.



4. Sikkerhed og rengøring

Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og håndtering af Maysound Music Player-modeller. For at undgå skader, læs da alle nedenstående sikkerhedsoplysninger og instruktioner om brug, før Maysound Music Player tages i brug.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL: Hvis disse sikkerhedsinstruktioner ikke overholdes, kan der opstå brand, elektrisk stød eller anden skade og beskadigelser.

Behandling af Maysound Music Player

Undgå at bøje, tabe, knuse, punktere, brænde eller åbne Maysound Music Player.

Undgå vand og våde områder

Brug ikke Maysound Music Player i regn eller i nærheden af vaskekummer og andre våde områder. Sørg for, ikke at spilde mad og væske på Maysound Music Player.

Hvis Maysound Music Player bliver våd, skal du afmontere alle kabler, slukke for Maysound Music Player, før den rengøres. Lad den tørre helt, før den tændes igen.

Reparation af Maysound Music Player

Forsøg aldrig selv at reparere Maysound Music Player, den indeholder ingen dele, som brugeren kan yde service på. Det genopladelige batteri i Maysound Music Player må kun udskiftes af et Maysound Service Center.

Kontakt Maysound forhandlere eller besøg: www.maysound.com/support for yderligere informationer omkring service.

Brug af Maysound Music Player strømforsyning

Ved opladning af Maysound Music Player anvendes den medfølgende strømforsyning. En ny strømforsyning kan købes hos Maysound forhandlere, læs mere på: www.maysound.com

Sæt strømfor syningen helt ind i stikkontakten.

Undgå altid våde hænder når strømfor syningen tilsluttes og afmonteres.

Brug aldrig en anden type strømfor syning end en Maysound Music Player-strømfor syning til opladning af Maysound Music Player.

Ved normal brug kan Maysound Music Player strømfor syningen blive varm.

Sørg altid for tilstrækkelig ventilation omkring strømfor syningen, og vær forsigtig, når den anvendes.

Afmonter strømfor syningen i følgende tilfælde:

Hvis netledningen eller stikket er blevet flosset eller beskadiget.

Hvis strømfor syningen udsættes for regn, væsker eller høj fugtighed.

Hvis strømfor syningens kabinet er beskadiget.

Hvis du mener, at strømfor syningen skal til service eller reparation.

Hvis du vil rengøre strømfor syningen.

Ekspert er anbefaler følgende for at undgå høreskader:

Skru ikke op for lydstyrken for at overdøve støj fra omgivelserne.


Skru ned for lyden, hvis brugeren ikke kan høre personer i nærheden som taler.

Undgå høreskader

Permanent høretab kan opstå, hvis Maysound Music Player benyttes ved for høj lydstyrke i en længere periode. Indstil lydstyrken til et fornuftigt niveau.

Sollys

For at undgå misfarvning af Maysound Music Player, bør den ikke udsættes for direkte sollys.

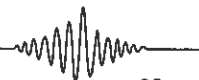

5. Tekniske specifikationer

Formater

Afspiller MP3 (64-192 kbps) og MCF.

Musik

Leveres med SD kort med over 60 minutter behandlingsmusik i MCF-format.

Ekstra hukommelse

Hukommelseskort, med udvalgte behandlingsmusiknumre i MCF-format, kan tilkøbes. Standard SD kort/MMC-kort, med egen MP3 musik, kan anvendes (16MiB – 2GiB, FAT12/16).

Ekstern lydkilde

AUX-stikket (3,5mm mini-jack stik) kan anvendes til tilslutning af en ekstern lydkilde. Lydstyrkejustering skal ske på den eksterne lydkilde.

Spilletid

Op til 20 timer per opladning ved middel lydstyrke. Ved afladet batteri slukker afspilleren automatisk.

Batterilevetid

Ca. 500 op/afladninger.

Batteriudskiftning

Skal foretages af autoriseret servicetekniker.

Opladning:

Ved hjælp af medfølgende strømforsyning.
Batteriet tåler delvise op- og afladninger.

Opladetid:

Ca. 2 timer. Op til 4 timer, hvis der afspilles musik under opladningen.

Lydtryk:

Max. 80dBfast SPL. 10 cm fra højtalerner.

Frekvenskarakteristik:

150Hz – 13kHz (+/- 6 dB).


Forvrængning:

<0,5%

Signal/støj-forhold:

>72dB

Dansk

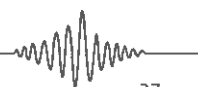

6. Opdater Maysound Music Player

Formål

Opdateringer vil løbende forbedre brugsoplevelsen af Maysound Music Player, i takt med der udvikles nye behandlingsprogrammer, som kræver ny funktionalitet.

Vejledning

Maysound Music Playeren tjekker automatisk, om der er en softwareopdatering tilgængelig på SD kortet.



Er der en nyere software tilgængelig på SD kortet, vil brugeren blive spurgt, om der skal foretages en opdatering af Maysound Music Playeren.



Hvis opdateringen ikke ønskes trykkes **-** for nej ellers **+** for at igangsætte opdateringen.

VIGTIGT: SD kortet må ikke fjernes fra Maysound Music Playeren, når opdateringen er i gang.


Efter endt opdatering vil Maysound Music Player automatisk blive genstartet, hvorefter den nye software anvendes.

Er batterierne ikke tilstrækkeligt opladet til at foretage en softwareopdatering, vil brugeren blive bedt om at tilslutte den medfølgende oplader.

Nye opdateringer

Flere informationer og seneste opdatering kan downloades fra:
www.maysound.com/update

Dansk

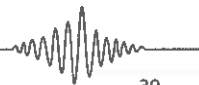

7. Håndtering, godkendelser og bortskaffelse

Vigtige oplysninger om håndtering

Transport

Maysound Music Player indeholder følsomme komponenter. Undgå at bøje, tabe eller knuse Maysound Music Player.

Brug af stik og porte

Tving aldrig et stik ind i en port. Se efter evt. forhindreger i porten. Hvis stikket ikke kan sættes i porten uden besvær, passer de sandsynligvis ikke sammen. Sørg for, at du bruger det rigtige stik, og hold stikket korrekt i forhold til porten.

Opbevaring

Brug og opbevar Maysound Music Player på et sted, hvor temperaturen altid er mellem 0° og 35° C. Spilletiden på Maysound Music Player kan midlertidigt blive kortere i områder med lave temperaturer. Efterlad ikke Maysound Music Player i bilen, da temperaturen i lukkede biler kan overstige denne grænse.

Hold ydersiden af Maysound Music Player ren

Afspilleren kan aftørres med sprit eller rengøringsmidler der ikke indeholder opløsningsmidler. Tåler ikke direkte vandpåvirkning.

Når Maysound Music Player rengøres, skal alle kabler afmonteres, slukkes for Maysound Music Player og luk hygiejneflappen til stik på bagsiden af afspilleren.

Regulatory Compliance Information

Opfylder kravene i de europæiske direktiver 72/23/EEC og 2004/108/EEC.



Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Maysound Music Player indeholder et vedligeholdelsesfrit lithiumbatteri. Bortskaf Maysound Music Player i henhold til gældende miljølove og retningslinjer.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponerd.



Taiwan:



廢電池請回收

Den Europæiske Union – Oplysninger om bortskaffelse:

Dette symbol betyder, at dit produkt bør bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når dette produkts livscyklus er forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er udpeget af de lokale myndigheder. På nogle genbrugspladser er det gratis at aflevere produkter. Den indsamling og genbrug af dit produkt, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter miljøet og vores sundhed.



© 2007 Maysound ApS. All rights reserved. Maysound, Maysounds® logo og andre Maysound varemærker er ejet af Maysound ApS og kan være registrerede. All andre varemærker er de respektive producenters ejendom. Maysound ApS påtager sig intet ansvar såfremt der skulle forefindes fejl i denne manual. Al information i denne brugervejledning kan ændres uden forudgående varsel.