



Blandevejledning for: Piperacillin/tazobactam "Fres.Kabi." i Easypump® fra Braun			
	Pip/Taz 8 g	Pip/Taz 12 g	Pip/Taz 16 g
Pumpen primes med NaCl	20 ml	90 ml	40 ml
Piperacillin/Tazobactam, pulv. til inj. og inf.væske, opl: htg 4 g eller kobling 4 g	2 htg./koblinger	3 htg./koblinger	4 htg./koblinger
NaCl Ecofac® Plus, Braun, infusionsvæske, 50 ml Vnr. 420079	2 X 50 ml	3 X 50 ml	4 x 50 ml
Holdbarhed efter blanding	Max 24 timer ved 15-25°C (incl. Indløbstid)	Max 24 timer ved 15-25°C (incl. Indløbstid)	Max 24 timer ved 15-25°C (incl. Indløbstid)
Easypump®, elastomerisk pumpe	Easypump II LT 125– 25-S ILS Vnr.: 103010 Lev.ref.nr: 4540006	Easypump II LT 270 – 27-S ILS Vnr.: 103013 Lev. ref.nr: 4540008	Easypump II LT 270 – 27-S Vnr.: 103013 Lev. ref.nr: 4540008
Indløbshastighed	5 ml/time	10 ml/time	10 ml/time
Indløbsvarighed	24 timer	24 timer	24 timer
Ecoflac® Connect ILS Vnr. 512702	2 stk.	3 stk.	4 stk.
3-vejs hane BD Connecta ILS Vnr. 256930	1 stk.	1 stk.	1 stk.
Slange til overføring Intrafix® Primeline Flush, secondary line. ILS Vnr. 433405	2 stk.	3 stk.	4 stk.
Sprøjte med luer lock til overføring af NaCl og blandet antibiotika til pumpe	1 stk.	1 stk.	1 stk.
Generel information			
Restmængde i Easypump®	Der kan være en restmængde i pumpen. Hvilket kan skyldes den overfyldning af væske, der er i Ecoflac® Plus beholderen og variation i indløbshastighed.		
Vigtig information	Blanding skal have stuetemperatur (23°C ± 2°C) inden administration. Opløsningen skal visuelt undersøges for synlige partikler eller misfarvning inden indgift. Opløsningen må kun bruges, hvis den er klar og ikke indeholder partikler.		
Spørgsmål om lægemiddel, opblanding, holdbarhed etc.	Kontakt Sygehusapotekets Lægemiddelinformation på: - Mail: laegemiddelinformation@rn.dk - Telefon: 97 66 58 57		
Spørgsmål vedr. påfyldning og brug af Easy Pump	Kontakt B.Braun konsulent Marian Egebirk - Marian.egebirk@bbraun.com - Telefon: 51 39 59 05		