

Ecoflac® Plus og Connect

Blanding af antibiotika og fyldning af infusionsæt

Antibiotika der ikke leveres koblet af sygehusapoteket, skal kobles på afdelingen ved anvendelse af Ecoflac® Plus væskeflaske og Ecoflac® Connect

1



Fjern beskyttelsefolie 1. Afspritning ikke nødvendig.



Påsæt Ecoflac® Connect (påsætning er sikker når du hører et "klik").

2



Kobl hætteglas til Ecoflac® Connect (igen en kliklyd). Fjern beskyttelsefolie 2 på flasken.

3



Ved sæt med fastmonterede grene lukkes udluftningsventiler og fyldes med NaCl fra flaske til efterskyl, hvorefter sættet kobles til flasken.

ELLER

Connect-slange kobles og fyldes med NaCl ved at holde systemet nedad med connect-slange nederst. Tryk let på flasken.

4



Opløsning af antibiotika. Hold systemet vandret med hætteglasset nederst. Pres væsken ned i hætteglasset (fyldes halvt). Bland antibiotika ved at bevæge systemet i cirkelbevægelser, til medicinen er opløst.

5



Overfør opløst antibiotika til flasken. Hold systemet med hætteglasset øverst. Tryk let på flasken (gentag punkt 4 og 5 flere gange, hvis nødvendigt).

6



Klar til administration.

- Vend flasken et par gange
- Tilslut infusionssettet IV-adgang
- Infunder antibiotika på vanlig vis
- Husk efterskyl slangen for restdosis
- **Efter administration kasseres det hele samlet, som klinisk risikoaffald**