

<b>Rengøring og desinfektion af endoskoper (oversigt)</b>				
<b>Instrument</b>	<b>Rengøring på OP-stuen</b>	<b>Rengøring i urent skoprum</b>	<b>Desinfektion</b>	<b>Efterbehandling</b>
Gastroskop Koloskop Sigmoidoskop Duodenoskop EUS-skop Choledokoskop Nasal gastroskop	Endoskopet aftørres med steril vands vædet klud. Endoskopet skylles igennem med sterilt vand. Ventiler og sugeslanger skal forblive på endoskopet.	Skopet nedsænkes i frisk tappet vand tilsat lavtskummende detergent i vask 1. Alle kanaler renses med rensbørste. Den lille ekstra kanal skylles igennem med detergent. NB! Den distale kappe på ERCP-skopet tages af, slæden renses med børste.	Endoskop-dekominator	Placeres i tørreskab. Endoskoperne kan anvendes i op til 7 døgn efter placering. (168 timer) NB! Duodenoskop, Gastroskop til PEG, EUS- og koledokoskop skal vaskes og sprittes umiddelbart før brug
Vandflaske Vandflaske til spul med slange. Spuleslange med grøn studs.				Placeres i net og sendes i sterilcentralen.
Biopsikanal-skyllleslange.		Rengøres manuelt i begge ender.	Instrument-dekontaminator påmonteret relevante slanger/studser. Tørres.	Biopsikanalslange hænges op i rent skoprum
<u>Tilbehør:</u> Ventiler Propper		Rengøres manuelt med børste. Køres i ultralydskar.		Propper og ventiler placeres i net og sendes i sterilcentralen.
<u>Invasivt fler-gangstilbehør uden plastkappe og hulrum:</u> Polypslynge		Instrumenter skylles igennem med detergent. Alt deles og skilles ad. Køres i ultralydskar. <u>Husk</u> at efterfylde tængerne med vand.		Placeres i net og sendes i sterilcentralen
<u>Invasivt flergangstilbehør og liqn. med hulrum:</u> Dormia Heatprobesonde Spiralslange til stenknuser Varm biopsitang		Instrumenter skylles igennem med detergent. Rengøres manuelt. Åbnes og køres i ultralydskar. <u>Husk</u> at efterfylde tængerne med vand.		Placeres i net og sendes i sterilcentralen
Håndtag		Rengøres manuelt. Køres i ultralydskar.		Placeres i net og sendes i sterilcentralen
Ballon-dilatationspistol		Vaskes i vand tilsat detergent. Skyllses i rent vand og tørres af. Sprittes.	Sprittes. Obs! Må <b>ikke</b> komme i instrumentvaskemaskine pga. rustskader.	