

Bilag udleveret af sygehuset til anvendelse i hjemmet vedrørende Rengøring og desinfektion af udstyr til understøttende respirationsterapi (8.10)

Når respirationsudstyr udleveres til patienten med henblik på anvendelse i eget hjem, skal det være forsynet med en brugsanvisning på dansk, der angiver rengørings- og desinfektionsproceduren.

I kommunerne bør proceduren for rengøring og evt. desinfektion samt skiftfrekvens tilrettelægges i samarbejde med den lokale hygiejneorganisation.

I denne tilrettelæggelse bør indgå oplysninger fra producenten/leverandøren vedrørende det konkrete udstyr, om skiftfrekvens og genbehandling, således at der findes løsninger, som tager udgangspunkt i, at man behandler borgeren i eget hjem.

Infektionshygiejniske anbefalinger til sundhedspersonale for håndtering af udstyr i borgerens hjem

- Udstyr håndteres rent
- Håndhygiejne udføres før og efter håndtering af udstyr
- Handsker anvendes ved risiko for forurening af hænderne.

Afhængig af brug og udstyr gøres nedenstående med fastlagte intervaller (dagligt eller ugentligt) samt ved synlig forurening

- Udstyret skilles ad
- Lægges i blød i rent kar/balje med vand og sæbe (alm. opvaskemiddel) i 15 minutter
- Rengøres med en ren, fnugfri, blød klud eller børste
- Skylles i rindende vand, således det er fri for sæberester
- Tørres med ren, fnugfri klud
- Opbevares rent og tørt mellem brug.

(Såfremt der opstår behov for desinfektion, er det ofte muligt at varmedesinficere ved enten at koge udstyret i en mikrobølgeovn i 5 minutter eller koge udstyret i en gryde i 5 minutter.

Er det ikke muligt at varmedesinficere, aftørres udstyret med ethanol 70–85% uden glycerol).

Reference

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for håndtering af udstyr til respirationsterapi. Central Enhed for Infektionshygiejne 2. udgave 2015.