

Bilag 1

Udtrækning af blod fra kateter

Anbefalet rækkefølge efter passende spildvolumen

Det anbefales, at blodet ikke kommer i kontakt med proppen under fyldning af røret.

Det vil sige, at røret under ingen omstændigheder må anbringes på hovedet under fyldningen. Efter blanding og inden centrifugering skal prøverør med gel stå oprejst.

Rør	Farvekode/ Tilsætning	Vendes	Spildrør*	Blod- volumen
	Bloddyrkning 1. Blå/grå 2. Blå/grå 3. Rosa/lilla Børn: Klar/rosa Syre – base			8-10 ml 1-3 ml 4 ml
	Rød prop Med clotaktivator Serumrør	X 8		2 mL 4 mL 6 mL
	Gul prop Med clotaktivator og gel Serumrør med gel	X 8		3,5 mL 8,5 mL
	Grøn prop Lithium-heparin Kemirør	X 8		2 mL 4 mL
	Lilla prop K ₂ EDTA Hæmatologirør	X 8		2 mL 4 mL 6 mL
	Rosa prop FC Mix Na ₂ EDTA-Flourid- Citrat Glucoserør	X 10		3,0 mL
	Blå prop Natriumcitrat 3,2 % Koagulationsrør	X 3	Blå prop Natrium-citrat 3,2 %	1,8 mL 2,7 mL 4,5 mL
	Sort prop Natriumcitrat Sænkingsrør	X 8	Blå prop Natrium- citrat 3,2 %	1,8 mL 5,2 mL
	Mørkeblå prop Spormetalrør, serum	X 8		6,0 mL